

Solução sem conservantes para hidratação e lubrificação dos olhos e lentes de contacto.
Frasco ABAK®.

COMPOSIÇÃO:

Hialuronato de sódio 0,15 g.
 Cloreto de sódio, trometamol, ácido clorídrico, água para preparações injectáveis q.b.p. 100 mL.

NOME E MORADA DO FABRICANTE:

Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - França.

QUANDO SE DEVE UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:

HYABAK contém uma solução destinada a ser administrada nos olhos ou nas lentes de contacto. Foi concebido:

- Para humedecimento e lubrificação dos olhos, em caso de sensações de secura ou de fadiga ocular induzidas por factores exteriores, tais como, o vento, o fumo, a poluição, as poeiras, o calor seco, o ar condicionado, uma viagem de avião ou o trabalho prolongado à frente de um ecrã de computador.
- Nos utilizadores de lentes de contacto, permite a lubrificação e a hidratação da lente, com vista a facilitar a colocação e a retirada, e proporciona um conforto imediato na utilização ao longo de todo o dia.

Graças ao dispositivo ABAK®, HYABAK permite fornecer gotas de solução sem conservantes. Pode, assim, ser utilizado com qualquer tipo de lente de contacto. A ausência de conservantes permite igualmente respeitar os tecidos oculares.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO:

- Evitar tocar nos olhos com a ponta do frasco.
- Não injectar, não engolir

Não utilize o produto caso o invólucro de inviolabilidade esteja danificado.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

INTERACÇÕES:

É conveniente aguardar 10 minutos entre a administração de dois produtos oculares.

COMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:

POSOLOGIA:

1 gota em cada olho durante o dia, sempre que necessário. Nos utilizadores de lentes: uma gota em cada lente ao colocar e retirar as lentes e também sempre que necessário ao longo do dia.

MODO E VIA DE ADMINISTRAÇÃO:

INSTILAÇÃO OCULAR.

STERILIDADE Para uma utilização correcta do produto é necessário ter em conta determinadas precauções:

- Lavar cuidadosamente as mãos antes de proceder à aplicação.
- Evitar o contacto da extremidade do frasco com os olhos ou as pálpebras. Instilar 1 gota de produto no canto do saco lacrimal inferior, puxando ligeiramente a pálpebra inferior para baixo e dirigindo o olhar para cima. O tempo de aparição de uma gota é mais longo do que com um frasco clássico. Tapar o frasco após a utilização. Ao colocar as lentes de contacto: instilar uma gota de HYABAK na concavidade da lente.

FREQUÊNCIA E MOMENTO EM QUE O PRODUTO DEVE SER ADMINISTRADO:

Distribuir as instilações ao longo do dia, conforme necessário.

EFEITOS NÃO PRETENDIDOS E INCÓMODOS (EFEITOS INDESEJÁVEIS):

Rara possibilidade de ligeiras irritações oculares.

CONSERVAÇÃO DO DISPOSITIVO:

NÃO EXCEDER O PRAZO LIMITE DE UTILIZAÇÃO, INDICADO NA EMBALAGEM EXTERIOR

PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE CONSERVAÇÃO:

Conservar a uma temperatura inferior a 25°C. Depois de aberto, o frasco não deve ser conservado mais de **8 semanas**.

DATA DE REVISÃO DESTA FOLHETO INFORMATIVO: 04/2009.

Solución sin conservante para la hidratación y lubricación de los ojos y de las lentes de contacto.
Frasco ABAK®.

COMPOSICIÓN:

Hialuronato sódico 0,15 g.
 Cloruro sódico, trometamol, ácido clorídrico, agua para inyectables c.s.p.

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE:

Laboratoires Théa, 12 rue Louis Blériot, 63017 CLERMONT-FERRAND CEDEX 2 - France.

EN QUÉ CASO (O CASOS) SE UTILIZA ESTE DISPOSITIVO:

HYABAK contiene una solución para ser administrada en los ojos o en las lentes de contacto. Se prescribe:

- Para la humidificación y la lubricación de los ojos en caso de que exista sensación de sequedad o de fatiga ocular provocada por factores externos t como el viento, el humo, la contaminación, el polvo, el calor seco, el aire acondicionado, los viajes en avión o el trabajo prolongado ante la pantalla o ordenador.
- En el caso de aquellas personas que utilizan lentes de contacto, permite la lubricación y la hidratación de las lentes de contacto con el fin de facilitar su colocación como su retirada, al tiempo que aportará un confort inmediato durante todo el día.

HYABAK, gracias a su dispositivo ABAK®, permite instilar gotas de solución sin conservantes y puede utilizarse con todo tipo de lentes de contacto. La ausencia de conservantes permite, igualmente, respetar los tejidos oculares.

ADVERTENCIAS ESPECIALES Y PRECAUCIONES PARTICULARES:

- Evite el contacto de los ojos con el gotero del frasco
- No inyectar ni ingerir.

En el caso de que el precinto no esté intacto, no utilizar el producto.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

INTERACCIONES:

Es conveniente dejar transcurrir 10 minutos entre la administración de dos productos oculares.

CÓMO UTILIZAR ESTE DISPOSITIVO:

POSOLOGÍA:

Instilar una gota en cada ojo a lo largo del día, tantas veces como sea necesario. Para las personas que utilizan lentes de contacto: instilar una gota en la lente de contacto cuando se las coloque o se las quite y tantas veces como sea necesario a lo largo del día.

MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

APLICACIÓN OCULAR.

STERILIDAD Para utilizar correctamente el producto deben tomarse ciertas precauciones:

- Lavarse cuidadosamente las manos antes de proceder a su aplicación.
- Evitar el contacto del gotero con los ojos o los párpados. Poner una gota de producto en el fondo de saco conjuntival inferior tirando ligeramente hacia el párpado inferior al tiempo que se mira hacia arriba. El tiempo de aparición de una gota es más largo que con un frasco clásico. Tapar el frasco de utilización. Antes de la colocación de las lentes de contacto dispensar una gota de HYABAK en la concavidad de la lente de contacto.

FRECUENCIA Y MOMENTO EN EL QUE DEBE ADMINISTRARSE EL PRODUCTO:

Repartir las aplicaciones durante todo el día en función de las necesidades.

EFFECTOS NO DESEADOS Y MOLESTOS (EFFECTOS INDESEADOS):

Rara posibilidad de que se produzcan leves irritaciones oculares.

CONSERVACIÓN DEL DISPOSITIVO:

NÃO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE CADUCIDAD QUE APARECE EN EL ENVASE EXTERIOR.

PARTICULARES PRECAUCIONES DE CONSERVACIÓN:

Conservar a una temperatura inferior a 25°C. No conservar el frasco abierto más de **8 semanas**.

FECHA DE REVISIÓN DEL PROSPECTO: 04/2009.